

Die Ruhe, die beweglich hält.

**R H O M B O**  
**M E D I C A L**

# **Rhombo-Care<sup>®</sup> Prevent Plus**

Antidekubitusmatratze

## **Gebrauchsanweisung**

Lück GmbH & Co. KG  
Vennweg 22  
46395 Bocholt  
[www.rhombo-medical.de](http://www.rhombo-medical.de)

Die Ruhe, die beweglich hält.

**R H O M B O**  
**M E D I C A L**

EL600000097



## Antidekubitus Matratze

Einsatzort : Pflege in Krankenhaus, Pflegeheim und Home Care

- Die Materialien müssen nicht gewartet werden.
- Die Matratze kann mit unterschiedlichen Bezügen kombiniert werden.
- Desinfektion je nach Bezugsart Wisch- oder Sprühdesinfektion möglich.
- Autoklave empfohlen bei 75° VDV Kammer.
- Kein Zusammenbau/ bzw. Montage notwendig. Auf Kennzeichnung der Oberseite achten.
- Ohne Beeinträchtigung bei verstellbarer Liegefläche.
- Keine Risiken bei Seitengittern.
- Keine Kontraindikationen bzw. Anwendungsrisiken.
- Nach entsprechender Aufbereitung ist die Matratze wieder einsetzbar.
- Beachten Sie die jeweilige Waschanleitung der Bezüge.

Aktualisiert Januar 2014

## Rhombo-Care® Prevent Plus

Die Matratze bietet als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei allen Dekubitus-therapien (Stadium I bis IV) ihren Beitrag.

**Kern:** PUR-Kaltschaum im Aufbau der Prevent Plus

**Bezug:** Diverse (s.u.)

**Zulässiges**

**Patientengewicht:** von BMI 0 bis BMI 35

Artikelbezeichnung	Größe/cm	Art.Nr.
Prevent Plus incl. Semy-Air Bezug *1)	90/200/15	19.148
Prevent Plus incl. Semy-Air Bezug *1)	100/200/15	19.151
Prevent Plus incl. Semy Plus Bezug	90/200/15	19.748
Prevent Plus incl. Semy Plus Bezug	100/200/15	19.751
Prevent Plus incl. Evakuierungsbezug *2)	90/200/15	19.248
Prevent Plus incl. Evakuierungsbezug *2)	100/200/15	19.251

\*1) neuartiger Rhombo-Care Semy Air Bezug mit flüssigkeitsdichtem Reißverschluss: Eine Seite aus superweichem Doppeltuch, die andere Seite mit Hygienebeschichtung

\*2) Spezialbezug mit Evakuierungsfunktionen (integrierte Transportschlaufen und Sicherungsgurte)