


Umlagerungslaken




Das besonders gleitfähige Material in der Mitte des Unterteils erleichtert das Verschieben des Patienten mit der oberen Gleitmatte.

Antirutschbereich

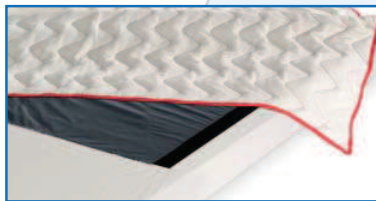

Das Unterteil des Drehlakens, welches über einen ultra gleitfähigen Mittelteil verfügt, wird auf die Matratze als Spannlaken aufgebracht.

Das Drehlaken ist weich, anpassungsfähig und wird auf das Unterlaken aufgelegt. Da es atmungsaktiv ist, kann es permanent im Bett verbleiben.

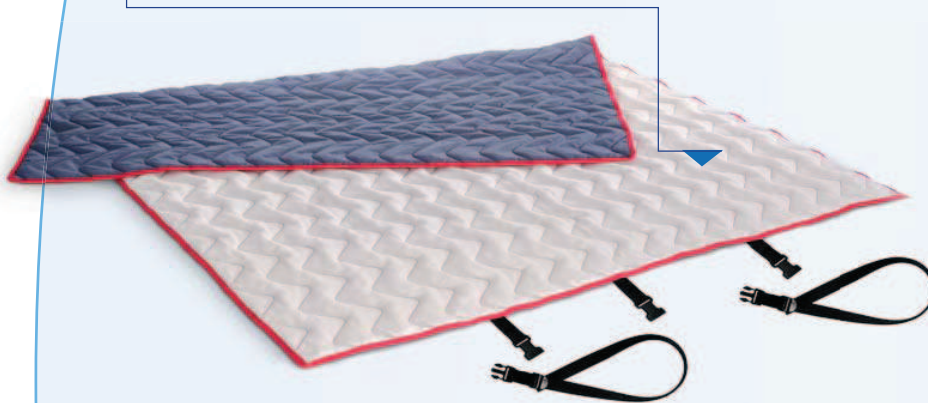

Drei Bänder ermöglichen die Befestigung am Kopfende des Bettes.

PM-Alpha® Drehlaken

Dieses Drehlaken besteht aus drei Teilen: einem Spannlaken, welches auf die Matratze gezogen wird, einem großen Oberlaken, sowie einer Antirutschmatte.

Die Oberseite des Oberlakens besteht aus Cotton / Naturdrell.

Das Drehlaken wird bei Patienten, die besonders schmerzempfindlich sind sowie bei schweren oder besonders pflegebedürftigen Patienten eingesetzt.

Verlagern und das seitliche Umlagern von Patienten wird ganz erheblich erleichtert. Durch das Einrollen des Drehlakens an den Körper des Patienten in Seitenlage und die anschließende Fixierung durch das Bettuch lässt sich eine einfache und schonende Seitenlagenstützung erreichen. An beiden Seiten der Gleitfläche auf dem Spannlaken ist ein rutschhemmender Sicherheitsstreifen vernäht, um ein evtl. Abrutschen zu verhindern.

Das Drehlaken hat am oberen Ende drei feste Bänder mit Clips. Mit diesen kann es bei Bedarf am Kopfende des Bettes am Lattenrost befestigt werden, um z. B. das Herunterrutschen eines im Bett sitzenden Patienten zu verhindern.

PM-Alpha® Drehlaken (3-teilig)

Bestell-Nr.: PM-1580
 inkl. Antirutschmatte PM-7010
 inkl. Spannlaken PM-1584
 Größe Oberlaken: 140 x 200 cm
 Größe Spannlaken: 100 x 200 cm
 Material: Cotton / Naturdrell
Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2010

geeignet für Betten in den Größen 90/100 cm x 200 cm

Sondergrößen auf Anfrage!



Die Antirutschmatte (35 x 25 cm) hemmt punktuell die Gleitfähigkeit.

