


Waschanleitung/ Wischdesinfektion für Ihr CorpoMED und LunaMED Kissen

Waschanleitung

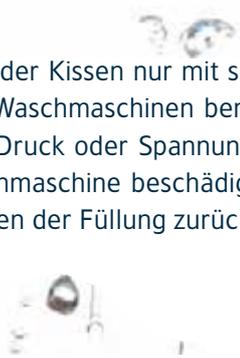

Waschen und Trocknen der Kissen nur mit sicher geschlossenem Außenbezug oder Wäschesack und nur bis 60°C. Nur Waschmaschinen benutzen, in denen sich das Kissen frei bewegen kann. Das Kissen nicht unter Druck oder Spannung in die Wäschetrommel pressen. Das Austreten der Füllung kann ihre Waschmaschine beschädigen. CorpoMED übernimmt keine Gewähr auf Schäden, die auf das Austreten der Füllung zurückzuführen sind. Nur Waschmittel ohne Chlor verwenden (Wäschereien)!

ACHTUNG:

Auslaufendes Füllmaterial kann die Atemwege beeinträchtigen. Das Kissen darf nur mit Außenbezug verwendet werden. Den inneren Reißverschluss (falls vorhanden) nur zum Auffüllen öffnen.

Wischdesinfektion

In einem Langzeittest wurde die Eignung der PU-Objektartikel unseres Sortiments Hygienetextilien auf verschiedene, handelsübliche und größtenteils in den RKI-, VAH- und IHO-Listen empfohlenen Wischdesinfektionsmittel geprüft.

Ganz bewusst wurden hierbei Desinfektionsmittel ausgewählt, die unterschiedlichen Wirkstoffgruppen angehören. Da der Großteil der handelsüblichen Wischdesinfektionsmittel auf einer dieser Wirkstoffgruppen basiert, ist es uns durch diese Herangehensweise möglich, Rückschlüsse auf die Eignung unserer Produkte auch auf andere, nicht geprüfte Desinfektionsmittel zu ziehen.

In Anbetracht der Testergebnisse können wir - bei Einhaltung der jeweils vorgeschriebenen Dosierungs- und Anwendungsempfehlungen - konstatieren, dass die PU-beschichteten Objekttextilien für die Wischdesinfektion mit den umseitig aufgelisteten Desinfektionsmitteln geeignet sind.

Hinweise:

Einige Desinfektionsmittel können Gelbfärbungen verursachen. Der Wechsel von Desinfektionsmitteln, besonders bei der Anwendung eines Mittels über einen längeren Zeitraum, sollte vermieden werden, da ansonsten Produktschädigungen nicht auszuschließen sind. Da wir auf die Herstellung und auf die Rohstoffe für die Desinfektionsmittelproduktion keinen Einfluss nehmen können, müssen wir jegliche Garantieleistungen auf die „Desinfektionsmittelbeständigkeit“ unserer Lieferanten ablehnen.



CorpoMED Gesundheitskissen GmbH

Vierlander Straße 14 · D-21502 Geesthacht

Telefon: +49 (0) 4152 / 8839-0 · Fax +49 (0) 4152 / 8839-39

info@corpomed.de · www.corpomed.de

Wischdesinfektion

Haupt-Wirkstoffgruppe	Desinfektionsmittel	Hersteller
Quartäre Ammoniumverbindungen und Amine	B15	Orochemie
	Floracin N	Favodent
	Hexaquart S	B. Braun
	Incidin Extra	Ecolab
	Kohrsolin FF	Bode Chemie
	Lysoformin Plus	Lysoform
	Mikrobac forte	Bode Chemie
	Optisal N	Dr. Schumacher
	Quartamon med	Schülke & Mayr
	Ruck Flächendesinfektion	Hellmut Ruck
	Terralin protect	Schülke & Mayr
Organische oder anorganische Substanzen mit aktivem Chlor (Chloramine, Chloramide etc.)	Wofapur FF	A&F-Hygiene
	Bechtol plus	Becht
	Clorina	Lysoform
	Natriumhypochlorit-Lösung 1 %	Hedinger
Perverbindungen	Trichlorol	Lysoform
	Apesin AP100	Tana
	Descogen F, I & liquid	Antiseptica
	Dismozon	Bode Chemie
	Perform	Schülke & Mayr
	Virkon S	Antec / DuPont
Formaldehyd und/oder sonstige Aldehyde bzw. Derivate	Wofasteril	Kesla
	Buraton 10 F	Schülke & Mayr
	Incidin PLUS	Ecolab
	Incidin Rapid	Ecolab
	Kohrsolin	Bode Chemie
	Melsept SF	B. Braun
	Melsitt	B. Braun
	Optisept	Dr. Schumacher
	Pursept FD	Merz
	Alkohol	B30-B40-B60
Bacillol AF		Bode Chemie
Bacillol Plus		Bode Chemie
Incidid Foam		Ecolab
Incidin Liquid		Ecolab
Isopropyl-alkohol 70%		Teofarma
Meliseptol		B. Braun
Meliseptol rapid		B. Braun
Micro Clean		Peppler
Pepp Clean		Peppler
Phenol oder Phenolderivate	Terralin liquid	Schülke & Mayr
	Amocid	Lysoform
	Gevisol	Schülke & Mayr
	Helipur	B. Braun
	Wofasept	Kesla

CorpoMED Gesundheitskissen GmbH

Vierlander Straße 14 · D-21502 Geesthacht
 Telefon: +49 (0) 4152 / 8839-0 · Fax +49 (0) 4152 / 8839-39
info@corpomed.de · www.corpomed.de