

## Pflegeempfehlung

**Material: Kunstleder / PVC / Wachstuch / PU-Stoff  
PU- sowie PUD-Beschichtung/dicht**

Die Bezugsmaterialien sind mit Wischdesinfektionsmitteln, die im VAH gelisteten sind, zu behandeln. Es darf kein Konzentrat verwendet werden.

Desinfektionsmittel, die zur Reinigung und Flächendesinfektion empfohlen werden:

<b>Hersteller:</b>	<b>Mittel:</b>
Dr. Schumacher GmbH	Cleanisept / Wipes 5%ig
B. Braun Melsungen AG	Hexaquart lemon fresh 2%ig
Franken Chemie GmbH & Co. KG	Franko-Cid N 0,25%ig
Bode Chemie GmbH	Microbac forte 2,5%ig

Zum Desinfizieren ist das Desinfektionsmittel nach dem Auftragen auf die Lagerungshilfe gleich trockenzureiben. Die Desinfektionsmittel sind gemäß dem jeweiligen Gebrauchshinweis zu verwenden.


---

Pflegeempfehlung für Schaumstoff blank

Dampfsterilisation bis 120°C  
sowie Gassterilisation

Die Angaben basieren auf Praxiserprobungen sowie Erfahrungen unserer Lieferanten.

Mit freundlichen Grüßen

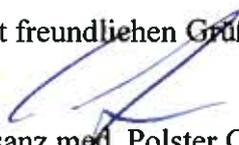

Bisanz med. Polster GmbH  
Christoph Kleemann  
Sicherheitsbeauftragter / Produktionsleiter

Stand 2011/2012